

## Acondicionamento e Envio de Amostra Citologia Cérvico -Vaginal Convencional [PAPA]

**Material:** Raspado de colo de útero (ecto e endocervical).

**Volume Mínimo:** 1 lâmina.

**Método:** Citologia.

**Meio de coleta:** Lâmina Histológica.

### Critérios de rejeição:

- Lâmina danificada, quebrada;
- Lâmina com iniciais do nome da paciente divergentes;
- Lâmina contaminada por fungos ou outros.

### Documentos:

- Requisição Médica;

**Estabilidade da amostra:** Até 30 dias após fixação adequada

**Transporte:** Em temperatura ambiente.

## Acondicionamento, embalagem e fixação:

Após a coleta, realizada com Espátula de Ayre e Escova Endocervical, feita a distensão em lâmina previamente identificada com as iniciais do nome da paciente e data de nascimento, fazer a fixação imediata conforme abaixo.

### Fixador Citológico de Revestimento (preferencial):

Pode-se utilizar o fixador spray ou aerossol, respeitando as instruções do fabricante. De forma geral, são realizados da seguinte forma:

**Manter o frasco na posição vertical, segurando a lâmina pela parte fosca.**

**A - Fixador Spray:** com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, borrifar 3 vezes, ou o suficiente para cobrir homogeneamente a lâmina, sem que escorra.

**B - Fixador Aerossol:** com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, aplicar o fixador com volume suficiente para cobrir homogeneamente a lâmina, sem que escorra. Armazenar a lâmina em frasco porta-lâminas identificado com nome e data de nascimento da paciente.

**1**

Coletar e identificar a lâmina na parte fosca;

Sempre identifique a lâmina com as iniciais e data de nascimento.



**2**

Aplicar o fixador citológico em toda a superfície da lâmina (exceto a parte fosca);




**3**

Identifique o tubete porta-lâminas com o nome completo e data de nascimento da paciente;




**4**

Você pode agrupar vários frascos, adequadamente vedados e identificados, e acondicioná-los numa bag secundária



**4**

Para os exames de citologia ginecológica, enrole o pedido médico no tubete para envio. Caso tenha fixado em álcool, coloque o tubete em um saquinho impermeável antes de embrulhar o pedido médico. Em caso de vazamento, o pedido estará protegido.




### Álcool:

(sempre que possível, utilize o fixador citológico)

**1**


Após a coleta, e com a lâmina identificada na parte fosca, colocar a lâmina no tubete e preencher com álcool;

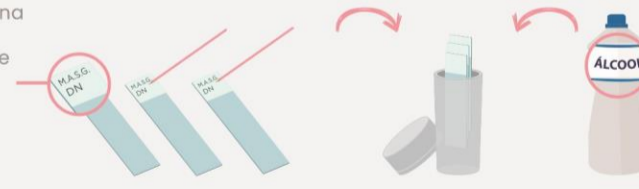

Utilizar, preferencialmente, álcool 95%, podendo utilizar até 70%.


**2**

Identifique o tubete porta-lâminas com o nome completo e data de nascimento da paciente. Utilize lápis para fazer a identificação, pois, se houver vazamento do álcool, a identificação da etiqueta não será apagada;



**3**

Vede o frasco adequadamente para evitar vazamentos. Sugerimos que seja dada a preferência por fixador citológico de revestimento, devido a superioridade de fixação e segurança contra apagamento de informações da etiqueta.



**4**

Caso envie com álcool, vede bem o frasco e coloque dentro de um saquinho, feche e coloque uma etiqueta extra por fora.

